

# NOTICE

## D'UTILISATION

### Corset - Siège



Le corset-siège qui vient de vous être livré a été réalisé sur prescription médicale de votre médecin.

Notre équipe a apporté tout le soin nécessaire à la fabrication de cette orthèse inscrite à la Liste des Produits et Prestations Référencés et pris en charge par les organismes de Sécurité Sociale.

Vous trouverez dans cette notice toutes les informations nécessaires à sa bonne utilisation et à son entretien.

- **DESCRIPTION :**

- Le corset siège (CS) est une orthèse\* prescrite pour améliorer une station assise déficiente.
- Réalisé sur mesures, plâtre ou scan, il est destiné à l'usage unique du patient.
- Conçu avec l'ajustement optimal au maintien orthopédique, il est tenu compte des vêtements quotidiens mais pas des couches supplémentaires extérieures (ex : anorak ou doudoune).

\* orthèse : appareil orthopédique permettant de protéger, immobiliser ou soutenir le corps ou une partie du corps déficient.

---

- **UTILISATION :**

- Le caractère ajusté de ce siège implique une installation précise :
  - ✓ Les fesses bien au fond pour éviter tout appui sur la butée.
  - ✓ Les vêtements bien rangés pour limiter les plis.
- Lors de l'installation, le blocage des freins du châssis / fauteuil et une inclinaison arrière du support facilitent le bon positionnement.

- **RECOMMANDATIONS :**

- Ce siège est destiné à un usage quotidien et ne comporte aucune norme ou agrément pour la sécurité routière.
- Dans le cadre des transports, l'utilisation des ceintures et dispositifs de fixation du véhicule sont indispensables pour garantir la sécurité.
- Un maintien adapté de la tête est impératif en cas de transport en véhicule.
- Une vérification régulière de la bonne fixation du siège au support ou au fauteuil roulant est vivement conseillée.


- ADAPTATION :

- Après la livraison, des ajustements ou modifications peuvent s'avérer nécessaires malgré tout le soin pris lors des différents essayages.
- Vous ne devez en aucun cas modifier seul l'intégrité du siège, mais informer votre orthoprothésiste qui a la responsabilité d'effectuer ces retouches.
- Lorsque le siège ne vous semble plus adapté (trop serré, court sous les bras ou aux genoux, ou encore rougeur de point d'appui), informez votre médecin ou votre orthoprothésiste pour procéder aux ajustements ou au renouvellement si nécessaire.

---

- ENTRETIEN :



- La housse intérieure en tissu 3D anti transpirant nécessite un soin particulier, lavage fragile en machine à 30°, sèche-linge interdit sous risque de rétrécissement du tissu.
- La coque plastique, le socle et les accessoires se nettoient simplement avec un désinfectant ou une éponge savonneuse.
- Tenir le siège à l'abri de toutes sources de chaleur susceptibles d'engendrer des déformations irréversibles de la coque plastique.
- Eviter la proximité avec tout animal domestique qui risque de griffer et détériorer les garnissages en mousse et tissus de finitions.

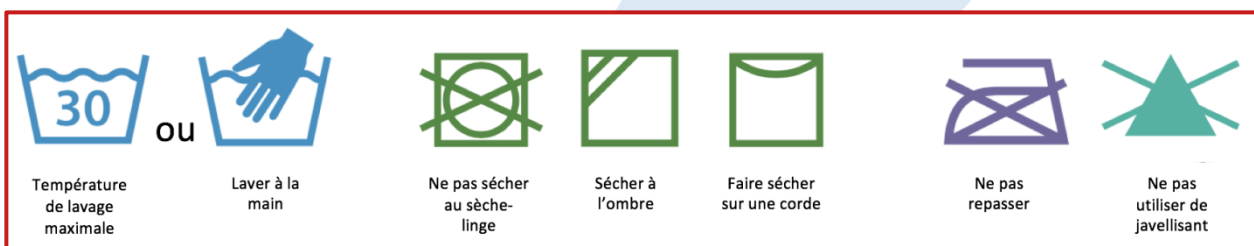

# DIETSCH ORTHOPEDIE

3 avenue Ernest Reyer

13009 MARSEILLE

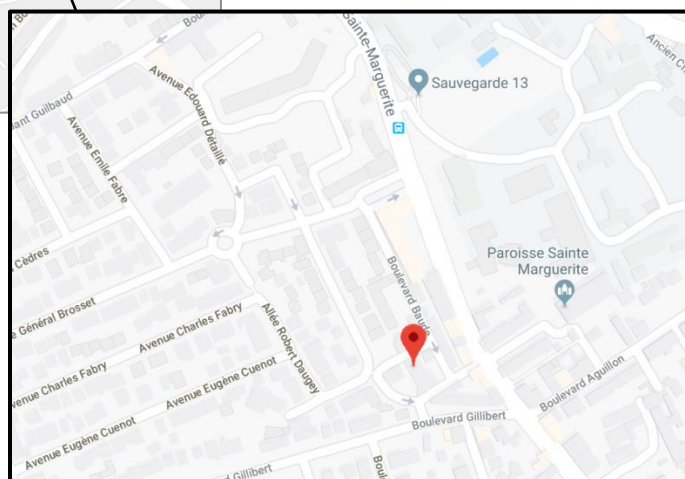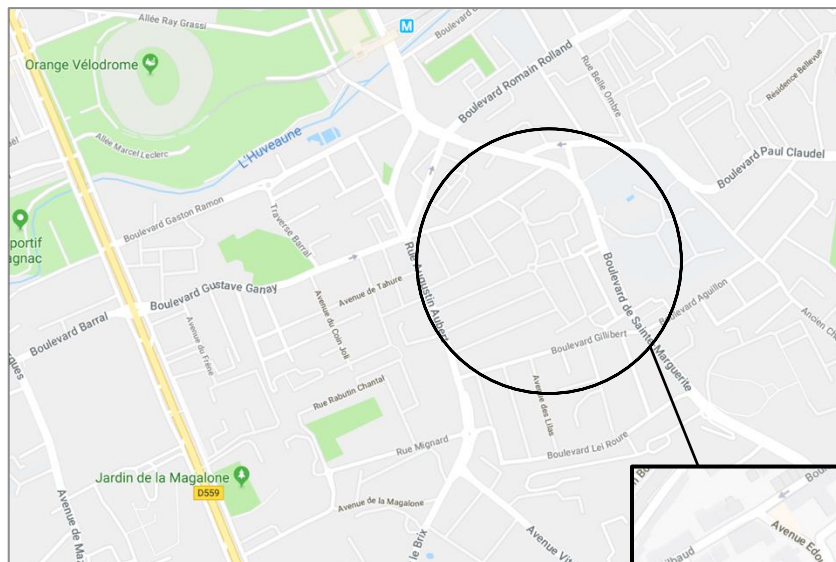

## Contactez votre Orthoprothésiste :



Alain **DIETSCH**



06.84.53.72.22



alain@dietsch-orthopedie.fr



Isabelle **FULGONI**



06.83.72.56.50



isabelle@dietsch-orthopedie.fr



Adrien **GERMAIN**



06.14.60.17.56



adrien@dietsch-orthopedie.fr